



MEDISEPT

Perfect disinfection



Quatroles® Unit NF

Kapalný koncentrát pro čištění a dezinfekci odsávacích zařízení, potrubních systémů a hydromasažních van ve zdravotnictví

Kapalný, koncentrovaný nepěňivý přípravek určený jak pro čištění, tak pro dezinfekci odsávacích systémů, separátorů amalgámu, plivátek stomatologických souprav a oběhových systémů hydromasažních van.

Charakteristika

- Působí již od 1% za 15 minut
- Účinek na bakterie vč. TBC, kvasinky a obalené viry
- Pro odsávací systémy, plivátka stomatologických souprav, separátory amalgámu
- Vynikající materiálová snášenlivost (ABS, plasty, akrylát, čalounění aj.)
- Nepění
- Prevence tvorby biofilmu

Výhody

- Pro široké spektrum citlivých materiálů
- Zaručená mikrobiologická účinnost a bezpečnost použití pro zdravotnický personál i pacienty
- Výrazné snížení rizika infekčních onemocnění
- Účinně odstraňuje zaschlé organické znečištění
- Snadná a rychlá příprava pracovních roztoků
- Pro profesionální použití



Koncentrát



Účinek na bakterie,
TBC, kvasinky
a obalené viry



Stomatologické
soupravy



Použitelný již
od 1%
za 15 minut

Quatroles® Unit NF

Oblast použití

Quatroles® Unit NF je koncentrovaný prostředek určený jak pro čištění, tak pro dezinfekci odsávacích zařízení, separátorů amalgámu a plivátek stomatologických souprav. Prostředek nepění. Při každodenním používání zabraňuje vzniku biofilmu. Lze jej používat také k dezinfekci uzavřeného oběhového systému v hydromasážních vanách, které slouží jako zdravotnické prostředky. Výrobek je určen pouze k profesionálnímu použití.

Spektrum mikrobiologického účinku	dle normy EN14885	expoziční doba		
		15 min	30 min	60 min
Baktericidní	EN 13727	1%		
Mikroskopické kvasinkovité houby	EN 13624	1%*		
	EN 13624	2%	1%	
TBC (<i>M. tuberculosis</i>)	EN 14348			4%
Virucidní - obalené viry (vč. HBV, HCV, HIV, Ebola, Vaccinia, chřipkové viry, Herpes simplex)	EN 14476	2%		

* čisté podmínky

Návod k použití

Pracovní roztok připravte ředěním koncentrátu ve vodě. Pro 2% roztok rozmíchejte 20 ml koncentrátu a 980 ml vody.

• **Použití na odsávací zařízení:** propláchněte pracovním roztokem podle míry znečištění jednou nebo dvakrát denně. Nechte nasát veškerý přípravek, vypněte přístroj a nechte působit alespoň 15 min. Po vydezinfikování propláchněte sací systém čistou vodou. Proplachování lze provést po uplynutí doporučeného času pro dezinfekci nebo následující den ihned po spuštění stomatologické soupravy. Nesměšujte s jinými čisticími nebo dezinfekčními prostředky.

• **Použití na hydromasážní vanu:** Před prvním použitím vypláchněte přístroj vodou pro odstranění případných zbytků jiného prostředku. Vanu napusťte čistou studenou vodou nad úroveň trysek. Přidejte 200 ml koncentrátu na každých 10 l vody. Zapněte cirkulaci hydromasážního zařízení na minimálně 15 minut. Po použití vanu vypusťte a důkladně opláchněte/ propláchněte vodou. Nesměšujte s jinými přípravky. Přípravek používejte jen v prázdné vaně, bez přítomnosti pacienta.

Složení

Obsah účinných látek ve 100 g přípravku: 4,4 g dioktyldimethylamonium-chlorid (CAS: 5538-94-3), 0,6 g alkyl (C12-C14) dimethylbenzylamonium-chlorid (CAS: 85409-22-9).

Balení

1 L láhev s integrovaným dávkovačem
5 L kanistr

Objednací kód:

SSE-GOT-ML164EXPCZ
SSE-GOT-ML171EXPCZ

Bezpečnost

Před použitím čtěte přiložený bezpečnostní list. Používejte výrobek bezpečně. Obsahuje: dioktyldimethylamonium-chlorid.

Nebezpečí



Standardní věty o nebezpečnosti: H314



Zdravotnický prostředek rizikové třídy IIa

Bezpečnostní list přípravku nalezte na www.medissept.pl

CE 2274