



MEDISEPT



Velox® Spray Teatonic

Připravený alkoholový roztok pro rychlou postřikovou dezinfekci a čištění neinvazivních zdravotnických prostředků a ostatních zdravotnických povrchů, nástrojů a stomatologických koncovek.

Velox® Spray Tea tonic je alkoholový dezinfekční prostředek pro rychlou dezinfekci malých ploch ve zdravotnictví, ambulancích, pečovatelských domech, sanatoriích, rehabilitačních a lázeňských centrech, tetovacích salónech, apod. Pro povrchy odolné vůči alkoholům. Bez varviv, aldehydů a fenolů. Rychle zasychá a nezanechává šmouhy.

Charakteristika:

- Pro dezinfekci malých ploch ve zdravotnických zařízeních: vyšetřovací lehátka a křesla, lékařské, chirurgické a rehabilitační zařízení a pomůcky.
- Pro zdravotnická zařízení i veterinární ambulance a kliniky.
- Účinek na kvasinky již od 15 sekund.
- Účinek na bakterie vč. TBC, obalené viry, Noro a Rota viry již od 30 sekund.

Výhody:

- Zaručená mikrobiologická účinnost a bezpečnost použití pro zdravotnický personál i pacienty.
- Výrazné snížení rizika infekčních onemocnění.
- Čistý a dezinfikovaný povrch během krátké doby.
- Pro široké spektrum citlivých materiálů.
- Ekonomické použití.
- Pro profesionální použití.



Dezinfekce
povrchu



Pro neinvazivní
zdravotnické
prostředky a
zdravotnické
povrchy



Účinek na TBC,
Noro i Rota viry
od 30 sekund



Verze s vůní
čajového tonika

TENTO VÝROBEK JE ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK. POUŽÍVEJTE DLE NÁVODU K POUŽITÍ NEBO DLE INSTRUKCÍ NA ŠTÍTKU.

Oblast použití:

Alkoholový dezinfekční prostředek pro rychlou dezinfekci malých ploch ve zdravotnictví, ambulancích, pečovatelských domech, sanatoriích, rehabilitačních a lázeňských centrech a pod. Pro povrchy odolné vůči alkoholům. Bez barviv, aldehydů a fenolu. Rychle zasychá a nezanechává šmouhy. Může být použit též k dezinfekci povrchů jako jsou pracovní desky, stoly, úchytky, kadeřnické a kosmetické vybavení a doplňky. Velox Spray má baktericidní, fungicidní (kvasinky), tuberkulocidní a omezený virucidní účinek (Rota, Noro, obalené viry vč. Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV, SARS-CoV-2).

SPEKTRUM	DLE NORMY EN 14885	TESTOVACÍ PODMÍNKY (PRO KONCENTRÁT)	
		ČISTÉ	ŠPINAVÉ
Baktericidní (vč. MRSA)	EN 13697	30 sek.	60 sek.
	EN 13727	30 sek.	30 sek.
	EN 16615	30 sek.	30 sek.
	EN 17387		5 min
Houby podobné kvasinkám	EN 13624	15 sek.	15 sek.
	EN 13697	30 sek.	
	EN 16615	30 sek.	30 sek.
	EN 17387		5 min
Houby	EN 13624		15 sek.
Mykobakterie tuberkulózy	EN 14348	30 sek.	30 sek.
Mykobakterie	EN 14348	30 sek.	60 sek.
Obalené viry (vč. Vaccinia, SARS-Cov-2, HBV, HCV, HIV, Ebola, Herpes simplex, chřipkové viry)	EN 14476	30 sek.	60 sek.
	EN 16777		60 sek.
BVDV virus	EN 14476	30 sek.	30 sek.
Rota virus	EN 14476	30 sek.	60 sek.
Noro virus	EN 14476	30 sek.	30 sek.
Veterinární - obalené viry (kočičí koronavirus FCoV)	EN 17122		60 sek.

Návod k použití:

Neředěný přípravek naneste v dostatečném množství na plochy a povrchy přímo postříkem ze vzdálenosti cca. 30 cm nebo pomocí přípravkem zcela napuštěné jednorázové netkané utěrky a ponechte působit předepsanou dobu nebo do zaschnutí. Dbejte na úplné (max. cca. 40 ml / m²) a rovnoměrné smočení povrchů nebo ploch. Neoplachujte vodou, neutírejte. Nepoužívejte na materiály citlivé vůči působení alkoholu (např. akrylátové sklo, plexisklo, plastové části zubní soupravy, atp.). Nemíchejte s jinými prostředky. Nestříkejte do očí ani obličeje. Po použití ihned pečlivě uzavřete aplikační sprejový nástavec nebo uzávěr nádoby. Nedoporučujeme používat ve zcela uzavřených prostorech.

Složení: Obsah účinných látek ve 100 g impregnačního roztoku:

63,7 g etanol,
6,3 g propan-2-ol.

Balení:

1L láhev s rozprašovačem,
5L kanystř



Bezpečnost: Před použitím pečlivě čtěte návod k použití i bezpečnostní list.

Obsahuje: propan-2-ol (CAS:67-63-0)

Varování

Standardní věty o nebezpečnosti: H226, H319

Zdravotnický prostředek rizikové třídy IIa

Bezpečnostní list přípravku naleznete na www.janda-dental.cz u daného přípravku.

